

ScopeValet™ ENDO BRUSH

Cepillo de varilla flexible para un solo uso, no estéril. Diseñado para la limpieza del canal interno de los endoscopios.

Características:

- Desechable, para un solo uso.
- Disponible en un tamaño de 5mm (para lúmenes de 2mm a 4mm) y en tamaño de 6mm (para lúmenes de 4mm a 5mm).
- Varilla flexible con longitud de 230cm: diámetro del catéter es de 1.8mm
- La rigidez del catéter Premium ofrece una introducción sin complicación.
- La doble terminación de su diseño ofrece una cobertura máxima dentro del canal de trabajo.
- Sus puntas redondeadas ayudan a prevenir el daño a los canales interiores de los endoscopios.



Uso previsto:

El ScopeValet™ ENDO BRUSH está diseñado para facilitar el lavado mecánico de canales para eliminar de manera segura los restos de los endoscopios flexibles:

Advertencias y precauciones:

- El cepillo de limpieza NUNCA deberá ser usado como un cepillo de citología.
- Las indicaciones con respecto al cuidado y la limpieza de los canales del fabricante de cualquier endoscopio deben ser revisadas antes del uso de cualquier cepillo de limpieza.
- Deseche el cepillo de limpieza después de haberse utilizado. La fijación mecánica del cepillo a la funda de plástico no se puede garantizar que sea fiable después de su uso inicial.
- Si se observan curvas cerradas durante la inserción del cepillo, éste deberá desecharse para evitar causar daños a los canales de funcionamiento del endoscopio.
- NUNCA TRANSFIERA un cepillo de limpieza usado de un endoscopio a otro endoscopio, ya que la contaminación cruzada puede ocurrir y dar lugar a complicaciones de los pacientes. Los cepillos de limpieza desechables están diseñados para eliminar los residuos de forma segura, algunos pueden ser retenidos en la estructura de las cerdas.
- Ruhof Healthcare no diseñó este dispositivo para ser reutilizado, y por lo tanto no se puede verificar que el reprocesamiento puede limpiar y/o esterilizar o mantener la integridad estructural del dispositivo para garantizar al paciente y/o a la seguridad del usuario.
- Estos productos están destinados para el uso en un solo paciente. Cualquier institución, médico o un tercero que reprocesa, restaura, remanufacture, reesterilice y/o reutiliza estos dispositivos desechables debe asumir la plena responsabilidad de su seguridad y eficacia.

Contraindicaciones:

Si durante la inserción del cepillo a través del endoscopio se presenta una resistencia, NO FUERCE el cepillo, ya que esto puede causar daños en el canal.