

ScopeValet™ Transport Bag (Bolsa de Traslado)

Artículo No. 345SVBT

La ScopeValet™ TRANSPORT BAG es una manera fácil y segura para trasladar un endoscopio de la sala de procedimientos al área de reprocesamiento. El cierre del cordón ajustable garantiza la seguridad del personal manteniendo el endoscopio sucio cerrado y envuelto durante su traslado.



Características

- Fácil de instalar antes de un procedimiento proporcionando una cobertura completa de la superficie, diseñado para superficies de carros grandes y pequeños. No hay necesidad de utilizar mantas, almohadillas o toallas absorbentes.
- Reforzada con una cobertura a prueba de fugas y una almohadilla interna absorbente manteniendo la Bio-carga y fluidos aislados, protegiendo y manteniendo su endoscopio seguro durante el traslado.
- Bolsa de 40" x 33" (104 cm x 84 cm) con almohadilla de 16" (41 cm) lo cual es el tamaño perfecto para un carro estándar de endoscopia.
- El tamaño de la bolsa es amplia con capacidad para todos los endoscopios, manteniéndolos protegidos al enrollar los ejes flexibles.
- Cuenta con cordones de cincha fáciles de usar, al jalarlos convierte la superficie de la almohadilla en el contenedor de traslado eliminando la necesidad de transportar en bandejas, fundas de almohadas y bolsas zip-lock.
- Cumpliendo cabalmente con las directrices de control de infecciones durante el traslado de endoscopios.
- Etiqueta de riesgo biológico advierte al personal de la posible exposición de residuos infecciosos.
- Etiqueta de "Instrumental Utilizado" informa al personal del valioso dispositivo médico en el contenido.
- Desechable, un solo uso

Instrucciones de Uso.

- Retire el embalaje y extienda la ScopeValet™ Bolsa de Transporte a lo largo de la superficie del carro de procedimiento, colocando al endoscopio sucio en el centro de la almohadilla.
- Tome el cordón de cincha el cierre de cordón en cada extremo de la almohadilla juntándolos en una mano sobre el centro de la almohadilla.
- Mientras se levanta el endoscopio y la almohadilla de la superficie del carro jale los cordones hacia arriba de las cuerdas con una mano al momento que jale hacia abajo con la otra mano para fácilmente asegurar la almohadilla en una bolsa de traslado.
- Basta con soltar los cordones ceñidos y abrir la bolsa de transporte para sacar el endoscopio para su reprocesamiento.



Contraindicaciones: Este producto es para usar sólo una vez. Su reutilización puede presentar riesgos para la seguridad de las personas, debido a la posible contaminación no controlada.