



## Endozime® Premium con A.P.A. Super Concentrado

Producto No. 34517-32

Detergente Polienzimático (multienzimático) para la limpieza de instrumental quirúrgico, laparoscópico y equipo médico con acción proteolítica avanzada y sustancias antioxidantes. DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA:  
LAVADORAS AUTOMÁTICAS, LAVADORAS DE ULTRASONIDO Y LIMPIEZA MANUAL.

Endozime® Premium con A.P.A. Súper Concentrado es una fórmula única con **enzimas amilasa, proteasa, lipasa carbohidrasa y enzimas con acción proteolítica avanzada (A.P.A.)** que elimina el bio-burden y detiene el óxido. A.P.A. es el último adelanto enzimático desarrollado por Ruhof Healthcare que incrementa en gran medida la actividad enzimática para proporcionar una penetración más rápida y completa en ligares difíciles de alcanzar en el instrumental quirúrgico, equipo médico y endoscopios. Recomendado para el reprocesamiento de todo el instrumental, desde lo más difícil de limpiar hasta lo más delicado. Endozime® Premium con A.P.A. Súper Concentrado cuenta ahora con aditivos biológicos que aceleran el proceso de licuefacción y solubilización y de esa manera facilitan la acción enzimática y contribuyen a la mayor efectividad del producto. Endozime® Premium con A.P.A. Súper Concentrado reduce la acumulación de película que dejan algunos desinfectantes de alto nivel no-glutaraldehídos.

### Características

#### DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA:

#### LAVADORAS AUTOMÁTICAS, LAVADORAS DE ULTRASONIDO Y LIMPIEZA MANUAL.

- Mezcla de enzimas propietarias diseñada para remover la bio-carga, sangre, carbohidratos, proteínas, polisacáridos, grasas, almidones, aceites, ácido úrico y otros componentes nitrogenados.
- Inhibe el óxido y el biofilm.
- Actúa al instante.
- No daña ningún metal, plástico, goma, tubería corrugada ni vidrio.
- Baja espuma, pH neutro, no deja residuos luego de su enjuague y 100% biodegradable.

### Modo de empleo

1. Diluir 2 mL de Endozime® Premium con A.P.A. Súper Concentrado en 1 litro de agua a temperatura ambiente para lavado manual.
2. Sumerja completamente los instrumentos en la solución.
3. Deje en remojo de 2 a 3 minutos.
4. Enjuague con abundante agua.
5. En maquinas lavadoras regule la maquina para 1 mL por cada litro de agua.
6. Para Endoscopios: aspire o haga fluir solución preparada a través del canal antes de sumergirse completamente.

**Precauciones:** No ingerir, No inhalar, Evite contacto directo con la piel. Evite contacto directo con los ojos. Puede provocar irritación en la piel y las mucosas, Utilice guantes.

**Almacenamiento:** Almacenar en un lugar seco a no más de 30°C

### Endozime® Premium con A.P.A. Super Concentrado

Este producto no cumple los criterios de clasificación en ninguna clase de peligro según el reglamento (CE) n° 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Pictograma de peligro: no aplicable

Registro Sanitario: 2099C2016SSA

CONTENIDO NETO: 4 L

**Endozime® Premium con A.P.A. Super Concentrado** está formulado a base de alcohol isopropílico, enzimas carbohidrasa, lipasa, amilasa, proteasa y enzimas propietarias con A.P.A.; detergente no iónico. Su pH es neutro. 100% Biodegradable