



## Endozime® AW Plus con A.P.A.

Producto No. 34521-35

*Detergente enzimático con actividad proteolítica, no iónico a base de alcohol isopropílico, con pH neutro. Concentrado para Instrumental y equipo médico. Para uso manual, lavadora automática y/o ultrasónica.*

Endozime® AW Plus con A.P.A. es una fórmula única con enzimas amilasa, proteasa, lipasa carbohidrasa y enzimas con acción proteolítica avanzada (A.P.A.) que elimina el bio-burden y detiene el óxido. A.P.A. es el último adelanto enzimático desarrollado por Ruhof Healthcare que incrementa en gran medida la actividad enzimática para proporcionar una penetración más rápida y completa en ligares difíciles de alcanzar en el instrumental quirúrgico, equipo médico y endoscopios. Recomendado para el reprocesamiento de todo el instrumental, desde lo más difícil de limpiar hasta lo más delicado. Endozime® AW Plus con A.P.A. cuenta ahora con aditivos biológicos que aceleran el proceso de licuefacción y solubilización y de esa manera facilitan la acción enzimática y contribuyen a la mayor efectividad del producto. Endozime® AW Plus con A.P.A. reduce la acumulación de película que dejan algunos desinfectantes de alto nivel no-glutareldehídos.

### Características

#### DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA:

#### LAVADORAS AUTOMÁTICAS, LAVADORAS DE ULTRASONIDO Y LIMPIEZA MANUAL.

- Remueve toda la materia orgánica.
- Inhibe el óxido y el biofilm.
- Actúa al instante.
- No daña ningún metal, plástico, goma, tubería corrugada ni vidrio.
- Baja espuma, pH neutro, no deja residuos luego de su enjuague y 100% biodegradable.

### Modo de empleo

1. Diluir 12 mL de Endozime® AW Plus con A.P.A. en 4 litros de agua a temperatura ambiente para lavado manual.
2. Sumerja completamente los instrumentos en la solución.
3. Deje en remojo de 2 a 3 minutos.
4. Enjuague con abundante agua.
5. En maquinas lavadoras regule la maquina para 2 mL por cada litro de agua.

**Precauciones:** No ingerir, No inhalar, Evite contacto directo con la piel. Evite contacto directo con los ojos. Puede provocar irritación en la piel y las mucosas, Utilice guantes.

**Almacenamiento:** Almacenar en un lugar seco a no más de 30°C

#### Endozime® AW Plus con A.P.A.

Este producto no cumple los criterios de clasificación en ninguna clase de peligro según el reglamento (CE) n° 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

**Pictograma de peligro:** no aplicable

Registro Sanitario: 0331C2000SSA

CONTENIDO NETO: 10L