



Orthozime®

Producto No. 34549-32

Detergente Enzimático Triple Diseñado Específicamente para Instrumentos Quirúrgicos Ortopédicos. Fórmula única y poderosa de enzimas y activadores que digieren grasas y proteínas desarrollada para limpiar instrumentos quirúrgicos, en particular instrumentos ortopédicos, en 2 minutos.

ORTHOZIME® fue creado específicamente para instrumentos ortopédicos "difíciles de limpiar". ORTHOZIME® comienza a disolver y digerir grasas, sangre, mucosas y otros contaminantes orgánicos al contacto. La inmersión de dos minutos de instrumentos óseos como cinceles, rongeurs, escariadores (intramedulares flexibles y acetabulares), brocas, hojas de sierra, etc. con ORTHOZIME® elimina virtualmente la laboriosa tarea de limpiar a mano estos instrumentos para eliminar la grasa y los desechos orgánicos. ORTHOZIME® es seguro y eficaz para los delicados instrumentos ortopédicos y elimina los olores biológicos mientras limpia.

Características

- Diseñado para la limpieza de instrumentos quirúrgicos ortopédicos y artroscópicos.
- Limpiador de triple enzima proteasa, lipasa y amilasa.
- Seguro para todos los instrumentos y endoscopios (flexible y rígido; extiende la vida útil)
- pH neutro, no abrasivo, de enjuague libre y 100% biodegradable. Fácil y seguro de usar.
- No daña ningún metal, plástico, caucho o tubería corrugada.
- Funciona en todas las temperaturas del agua.

Modo de empleo

Trabaja en agua a cualquier temperatura.

Para instrumental quirúrgico:

1. Vierta 32 ml de Orthozime® por cada 4L de agua.
2. Sumerja completamente los instrumentos a ser limpiados tan pronto sea posible después de su uso.
3. Deje en remojo de 2 a 3 minutos para remover grasa, proteínas y toda la materia orgánica.
4. Enjuague con abundante agua tibia, agua destilada o agua estéril.

Para dispositivos de limpieza automática:

Siga las recomendaciones del fabricante.

Orthozime® puede:

1. Vacíarse directamente en el reservorio de detergente para una acción completa, o
2. Diluir a una concentración de 32 ml por cada 4L de agua.

Precauciones: No ingerir, No inhalar, Evite contacto directo con la piel. Evite contacto directo con los ojos. Puede provocar irritación en la piel y las mucosas, Utilice guantes. Mantener alejado de los niños

Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco a no más de 30°C

Orthozime®

Este producto no cumple los criterios de clasificación en ninguna clase de peligro según el reglamento (CE) n° 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Pictograma de peligro: no aplicable

CONTENIDO NETO: 4 L

Registro Sanitario: **1179C2002 SSA**