

Premixslip®

Producto No. 34552-32

*Lubricante para instrumentos e inhibidor de óxido
El único inhibidor de óxido y lubricante para instrumentos probado
clínicamente para ser completamente penetrable y esterilizable con
vapor.*



Premixslip® es un lubricante de aceite mineral no pegajoso, no tóxico, sin silicona y soluble en agua que puede soportar las altas temperaturas del autoclave sin volverse pegajoso. Al formar una barrera protectora en los instrumentos quirúrgicos, Premixslip® previene la oxidación, las manchas y restaura las articulaciones de las cerraduras y uniones pegajosas. Utilizado habitualmente como parte del sistema de cuidado de instrumentos Premixslip® reducirá considerablemente los costos de reparación y reemplazo. Premixslip® proporciona lubricación y protección permanentes para todos los instrumentos quirúrgicos.

Características

- Lubricante de aceite mineral de alta calidad e inhibidor de óxido.
- Previene óxido, manchas, y corrosión prolongando así la vida del instrumento.
- Evita daños debido al mal uso de instrumentos rígidos o abrasivos, reduciendo así los costos de reparación y reemplazo.
- Penetrable por vapor, esterilizable por vapor y esterilizable por ETO.
- No aceitoso, no pegajoso, no tóxico y sin silicona.

Modo de empleo

Úselo directo - No diluir - Agite suavemente antes de usar.

Para aplicaciones de inmersión:

1. Sumerja los instrumentos previamente limpiados en la solución Premixslip®.
2. Retirar los instrumentos y dejar escurrir unos 30 segundos.
3. **Para instrumentos excepcionalmente rígidos:**
 - Coloque un solo instrumento abierto en solución durante 5 minutos.
 - Abra y cierre activamente la abrazadera o las tijeras en la solución durante 30 segundos.
 - Proceda según las instrucciones.
4. Los instrumentos drenados están listos para su preparación y esterilización final.

No enjuague, limpie ni seque.

5. Siempre cubra la solución Premixslip® cuando no esté en uso.

Precauciones:

No ingerir, No inhalar, Evite contacto directo con la piel. Evite contacto directo con los ojos. Puede provocar irritación en la piel y las mucosas, Utilice guantes. Mantener alejado de los niños.

Almacenamiento:

Almacenar en un lugar seco a no más de 30°C

Premixslip®

Este producto no cumple los criterios de clasificación en ninguna clase de peligro según el reglamento (CE) n° 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Pictograma de peligro: no aplicable

CONTENIDO NETO: 4L