



Premixslip® AW Clear

Producto No. 34555-35

Lubricante para instrumentos e inhibidor de Óxido para usar en todas las lavadoras

Inhibe la oxidación, y las manchas en todos los instrumentos de acero inoxidable al tiempo que agrega un revestimiento protector para evitar la corrosión

Premixslip® AW Clear es un lubricante para instrumental quirúrgico sin aceite diseñado para su uso en lavadoras automáticas. Premixslip® AW Clear forma una barrera protectora que evita la oxidación, y las manchas al tiempo que restaura la articulación en las cerraduras y juntas adhesivas, lo que reduce en gran medida los costos de reparación y reemplazo. El uso rutinario de Premixslip® AW Clear asegura una acción suave de elementos multifacéticos como pinzas rongeurs, retractores, instrumentos laparoscópicos y dispositivos de grapado.

La formulación soluble en agua de Premixslip® AW Clear no contiene silicona, ni aceite mineral, no es pegajosa, no es tóxica y puede soportar las altas temperaturas de la autoclave sin volverse gomosa.

Características

- Perfecto para usar en todas las lavadoras.
- Evita la oxidación, manchas, y corrosión prolongando así la vida útil del instrumento.
- Evita daños debido al mal uso de instrumentos rígidos o de afilado, reduciendo los costos de reparación y reemplazo.
- Penetrable por vapor, esterilizable por vapor y esterilizable por ETO.
- No aceitoso, no pegajoso y no tóxico; libre de silicona y aceite mineral.

Modo de empleo

Dispositivos de Limpieza Automática:

Siga las recomendaciones del fabricante:

1. Calibre la lavadora a una dilución de 5ml de Premixslip® AW Clear por 1 litro de agua (5/8 de onza por 1 galón de agua).

Para aplicaciones de inmersión:

1. Sumerja los instrumentos previamente limpios en Premixslip® AW Clear.
2. Remueva los instrumentos y deje escurrir por 30 segundos.

3. Para Instrumental excepcionalmente rígido:

Coloque individualmente el instrumento abierto en la solución por 5 minutos. Abra y cierre las pinzas o tijeras en la solución por 30 segundos. Continuar como se indica.

4. Los Instrumentos escurridos están listos para la preparación y esterilización final. No enjuague, limpie o seque.

5. Siempre cubra la solución de Premixslip® AW Clear cuando no la este usando.

En áreas donde la concentración de minerales en el agua es alta, puede ser necesario usar con más frecuencia.

NO USE MÁS SOLUCIÓN CONCENTRADA QUE LA INDICADA para solucionar este problema.

Precauciones:

No ingerir, No inhalar, Evite contacto directo con la piel. Evite contacto directo con los ojos. Puede provocar irritación en la piel y las mucosas, Utilice guantes. Mantener alejado de los niños. Elimine la solución utilizada y el contenedor vacío en contenedores apropiados.

Almacenamiento:

Almacenar en un lugar seco a no más de 30°C

Premixslip® AW Clear

Este producto no cumple los criterios de clasificación en ninguna clase de peligro según el reglamento (CE) n° 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Pictograma de peligro: no aplicable

CONTENIDO NETO: 10L