



Surgistain®

Producto No. 34572-32

Elimina óxido, manchas y salpicaduras de los instrumentos quirúrgicos de acero inoxidable en 15 minutos.

El uso rutinario mejorará la vida útil y la eficiencia de los instrumentos de acero inoxidable.

Surgistain® es una solución revitalizante segura, eficiente y rápida para instrumentos quirúrgicos, bandejas, lavabos y carros de estuches de acero inoxidable.

Surgistain® elimina el óxido, las salpicaduras, las manchas, las incrustaciones de agua dura y los depósitos minerales que se encuentran con frecuencia en la esterilización. También ayuda a aflojar las uniones rígidas y las cerraduras.

Se recomienda que se inicie un programa preventivo de rutina usando Surgistain® semanalmente o cada dos meses según sea necesario.

El uso regular mejorará la vida útil y la eficiencia de los instrumentos, bandejas, lavabos y carros de cajas de acero inoxidable, al tiempo que reducirá los costos de reemplazo.

Como solución ácida suave, Surgistain® es seguro para usar en instrumentos delicados, así como en los diversos accesorios e instrumentos oftalmológicos para endoscopios y microscopios.

No se recomienda el uso de Surgistain® en instrumentos cromados o plateados.

Características

- Solución revitalizante segura, eficiente y rápida que elimina óxido, manchas de agua dura y depósitos minerales de los instrumentos.
- Perfecto para usar en bandejas y carros de acero inoxidable.
- Excelente para uso en máquinas de ultrasonido.
- Mejora la vida útil y la eficiencia de los instrumentos quirúrgicos.
- Perfecto para usar en quirófanos, cirugía ambulatoria, oftalmología, odontología y otros departamentos.
- Fácil enjuague.
- Biodegradable.

Modo de empleo

Para instrumentos quirúrgicos:

1. Agregue 150 ml. de Surgistain® a un litro de agua caliente.
2. Coloque la solución en un recipiente no poroso (*preferentemente de acero inoxidable o vidrio pyrex*).
3. Coloque los instrumentos limpios y abiertos en una bandeja de instrumentos con fondo de acero inoxidable.
4. Coloque en la solución Surgistain® durante 15 minutos (*para instrumentos gruesos o muy manchados, remoje durante 30 minutos*).
5. Retire los instrumentos de la solución Surgistain® y enjuague con agua.

Para carros y bandejas de acero inoxidable:

1. Agregue 150 ml. de Surgistain® a un litro de agua caliente (50° - 80°C).
2. Usando guantes, aplique la solución y frote a fondo el carro o la bandeja con un cepillo de cerdas duras.
3. Enjuague bien con agua.
4. El carro de la caja puede requerir que se seque con una toalla si se usa el lavado manual de carros.

Para dispositivos de limpieza ultrasónica y automáticos:

1. Vierta 500 ml. de Surgistain® por cada 4L de agua directamente en el depósito de detergente, o calibre la tasa de dilución de la lavadora a 500 mL. por cada 4L de agua.
2. Después de la limpieza automática o por ultrasonido, retire la bandeja de instrumentos y enjuague con agua corriente. *Este paso se puede eliminar si los instrumentos se limpian inmediatamente en una lavadora.*

Precauciones:

Deseche la solución utilizada, No inhalar, Evite el contacto con la piel, No ingerir, Utilice lentes de seguridad al manipular el producto, En caso de contacto con la piel y/o ojos, enjuagar inmediatamente con agua abundante si los síntomas persisten consultar al médico.

EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE AL MÉDICO Y APORTÉ ESTA ETIQUETA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco a no más de 30°C

