

ScopeValet™

CleanStart™ Bedside Kit

Mejorado con TECNOLOGÍA BIOCLEAR

Producto No.345EBK - 250ml
345EBK500 - 500ml

El único kit de cuidado para endoscopia que elimina los lípidos sintéticos y los contaminantes gruesos de la superficie del endoscopio y los canales internos, ahora en una bolsa fácil de usar.

ScopeValet™ CleanStart Bedside Kit está diseñado para un uso práctico junto a la cama para eliminar todos los contaminantes de la funda exterior y el canal interior de los endoscopios. El kit contiene una esponja Endozime® SLR diseñada para eliminar la suciedad del tubo de inserción y una solución enzimática Endozime® SLR para succionar a través de los canales.

El detergente enzimático Endozime® SLR con tecnología Bio-Clean está diseñado para eliminar los lípidos sintéticos mientras se dirige a los polisacáridos insolubles que encierran la biopelícula, lo que permite la eliminación completa de toda la carga biológica y la biopelícula mediante desinfectantes de alto nivel o esterilizantes químicos líquidos.

ScopeValet™ CleanStart Bedside Kit facilita la limpieza, evitando que se seque la suciedad antes de transportar el endoscopio para su reprocesamiento.

Características

- Comienza a limpiar al contacto, evitando que la suciedad se seque en las superficies del endoscopio
- Elimina contaminantes graves, incluidos los lípidos sintéticos
- La solución Endozime® SLR es una mezcla sinérgica de proteasa, amilasa, lipasa, carboxidasa y enzimas patentadas
- Adaptado de forma única para todos los endoscopios: flexible / rígido
- Seguro en todos los endoscopios; no dañará ningún metal, plástico, tubería corrugada de goma, vidrio o espejos
- pH neutro, no abrasivo, 100% biodegradable y de enjuague libre
- Cada kit está empaquetado individualmente para un solo uso, lo que elimina el riesgo de contaminación cruzada
- Disponible en envases de 250 ml y 500 ml; El tamaño de la bolsa de 500 ml cumple con las pautas de ciertos fabricantes para la limpieza previa
- La bolsa tiene una base ancha y estable para evitar que se vuelque.

Modo de empleo

AL MANIPULAR INSTRUMENTOS SUCIOS, SIEMPRE SE REQUIERE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). EL EPP INCLUYE GUANTES, BATA IMPERMEABLE, PROTECCIÓN PARA LOS OJOS, ESCUDO FACIAL O MASCARILLA QUIRÚRGICA SIMPLE.

1. Inmediatamente después del procedimiento, abra la bolsa. Levante la esponja por encima del líquido y exprima suavemente el exceso de líquido de la esponja hacia la bolsa.
2. Sostenga la esponja sobre una almohadilla absorbente y coloque el tubo de inserción en la ranura de la esponja contorneada empapada en Endozime® SLR limpie el tubo de inserción.
3. Sumerja la punta distal en la bolsa que contiene la solución Endozime® SLR y aspire TODO el líquido de la bolsa.
4. Una vez que la bolsa esté vacía, retire la punta distal de la bolsa. Enjuague con agua y aire en el canal de aire / agua de acuerdo con las instrucciones del fabricante del endoscopio.
5. Vuelva a colocar la esponja en la bolsa vacía y deséchela en un contenedor de residuos u ofrézcala para su reciclaje si es posible. No utilice la bolsa vacía para otros fines.
6. El endoscopio debe colocarse en una bolsa / recipiente de endoscopio sucio y llevarse al área de reprocesamiento.

Precauciones: No ingerir, No inhalar, Evite contacto directo con la piel. Evite contacto directo con los ojos. Puede provocar irritación en la piel y las mucosas, Utilice guantes. Mantener alejado de los niños

Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco a no más de 30°C



ScopeValet CleanStart Bedside Kit

Este producto no cumple los criterios de clasificación en ninguna clase de peligro según el reglamento (CE) n° 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Pictograma de peligro: no aplicable



PARA USO UNA SOLA VEZ