

ScopeValet™

Dual End Valve Brush

Producto No. 345VB

El cepillo de válvula de extremo doble ScopeValet™ se utiliza para eliminar de forma segura los desechos de las aberturas de las válvulas y los diales del cabezal de control de los endoscopios flexibles



Características

- Los tamaños de cabezal de cepillo variables se adaptan a todos los botones y válvulas
- El mango de agarre ergonómico y de longitud extendida facilita el cepillado del puerto de biopsia
- La densidad y rigidez de las cerdas optimizadas garantizan una acción de fregado suave y eficaz
- Desechable, de un solo uso

Modo de empleo

1. Retire la (s) válvula (s) del cabezal de control del endoscopio.
2. Con el detergente enzimático Ruhof de su elección, use el cepillo para limpiar suavemente las aberturas de la válvula.

Evite torcer o apretar el mango del cepillo.

3. Con el detergente enzimático Ruhof de su elección, limpie el cabezal de control y los diales del cabezal de control.

Precauciones: Después de su uso, este producto puede presentar un riesgo biológico potencial.

Manipule y elimine de acuerdo con la práctica médica aceptada y las leyes y regulaciones locales, estatales y federales aplicables. **Mantener alejado de los niños**

Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco a no más de 30°C

ScopeValet Dual End Valve Brush

Este producto no cumple los criterios de clasificación en ninguna clase de peligro según el reglamento (CE) n° 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Pictograma de peligro: no aplicable



PARA USO UNA SOLA VEZ