

ScopeValet™

Valvesafe™

Producto No. 345VS



Valvesafe™ es una caja de válvula de endoscopio de un solo uso para el almacenamiento seguro de las válvulas de endoscopio, lo que garantiza que permanezcan como parte de un conjunto único con el endoscopio original.



Ayuda a cumplir con las pautas recomendadas nacionales e internacionales (AORN, ANSI / AAMI, SGNA, BSG, ESGE) que establecen que las válvulas de endoscopio (incluidas las válvulas de enjuague) permanecen con el endoscopio mencionado durante todo el proceso de limpieza. Las válvulas (incluidas las de enjuague) deben permanecer con un endoscopio como conjunto, para evitar infecciones cruzadas y permitir una trazabilidad completa.

Detalles de diseño

- Producto de un solo uso que no se puede reutilizar y, por lo tanto, ayuda a reducir la contaminación cruzada.
- **La tecnología "Smart-Click" garantiza que la jaula no se pueda volver a cerrar una vez que se haya utilizado**
- Se fija al endoscopio principal sin ocultar ninguna parte
- **Lo suficientemente grande para varias válvulas, incluidas las válvulas de limpieza:**
- Válvula de aire / agua
- Válvula succionadora
- Adaptador de limpieza de aire / agua
- Tapón de biopsia (si no se rompe)
- Construcción de plástico para prevenir la oxidación y cualquier crecimiento microbiológico.
- Tiene 4 aberturas integradas para la cadena del adaptador de limpieza de aire / agua
- Grandes aberturas, para permitir el paso de las soluciones de limpieza.

Características y Beneficios:

- **Permite el cumplimiento de:**
- las nuevas Directrices de la **AORN** para la práctica perioperatoria
- **ANSI / AAMI ST91:** Guía completa para el procesamiento de endoscopios flexibles y semirrígidos en la atención médica
- Comité de Práctica de la **SGNA:** Normas de prevención de infecciones en el reprocesamiento de endoscopios gastrointestinales flexibles
- Aborda las recomendaciones de las guías internacionales (*Sociedad Británica de Gastroenterología; Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal*)
- Protege las válvulas contra daños durante el proceso de limpieza
- Tiene la marca **CE** para uso médico
- Probado en Laboratorio de Investigación de Infecciones del Hospital para demostrar su efectividad
- Mantiene el endoscopio y sus accesorios juntos durante el proceso de limpieza
- Es un diseño simple de un solo uso
- Ayuda en la trazabilidad del endoscopio y sus válvulas
- Las grandes aberturas permiten el paso de una desinfección adecuada


Continua...

ScopeValet™

Valvesafe™


Producto No. 345VS

Modo de empleo

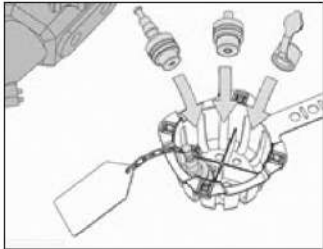


PASO UNO

Retire las válvulas del endoscopio y límpielas manualmente.

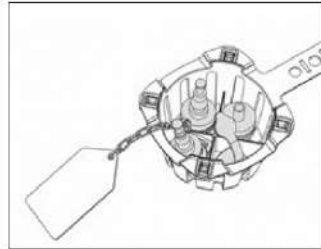


PASO DOS

Coloque las válvulas en el ScopeValet™ Valvesafe™ abierto. La cadena de la válvula de limpieza A / W debe pasar por el hueco.

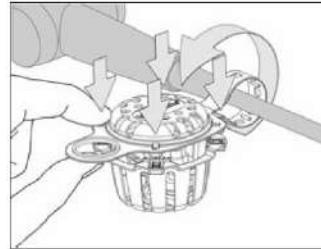

PASO TRES


Cierre la parte superior del ScopeValet™ Valvesafe™ alrededor del cordón umbilical del endoscopio, asegurándose de que las cuatro clavijas estén ubicadas individualmente en las carcasas opuestas. No presione la tapa desde el centro.

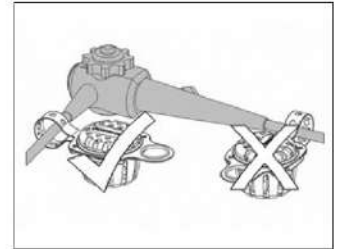

PASO CUATRO


Asegúrese de que ScopeValet™ Valvesafe™ esté cerrado alrededor del cordón umbilical y no del tubo de inserción del endoscopio.

Cabe señalar que Valvesafe™ y las válvulas ahora permanecen con el endoscopio como un conjunto único durante el resto del proceso de descontaminación. Valvesafe™ también protege las válvulas durante el ciclo de descontaminación. Valvesafe™ permanece en el endoscopio hasta que el endoscopio se lleva de regreso a la sala de procedimientos y está listo para usarse nuevamente.

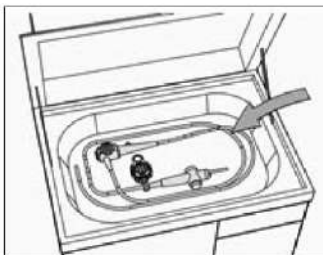


PASO CINCO

Vuelva a procesar el endoscopio y colóquelo en un armario de secado si es necesario.

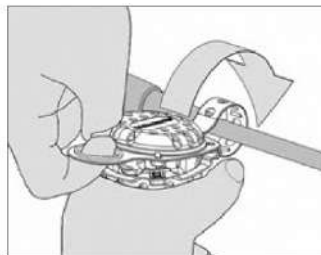

PASO SEIS

Tire del "anillo de tracción" para abrir el ScopeValet™ Valvesafe™ y para liberar las válvulas.

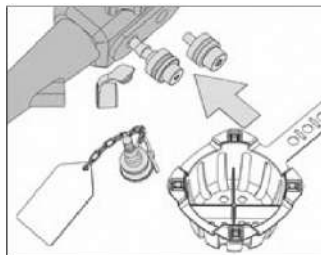

PASO SIETE

Vuelva a colocar las válvulas con el endoscopio.



PASO OCHO

Deseche de forma segura el ScopeValet™ Valvesafe™. No reutilice.

Precauciones: Después de su uso, este producto puede presentar un riesgo biológico potencial.

Manipule y elimine de acuerdo con la práctica médica aceptada y las leyes y regulaciones locales, estatales y federales aplicables. **Mantener alejado de los niños**

Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco a no más de 30°C

ScopeValet Valvesafe™

Este producto no cumple los criterios de clasificación en ninguna clase de peligro según el reglamento (CE) n° 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Pictograma de peligro: no aplicable



PARA USO UNA SOLA VEZ